

1.1. Регулировка крыльев спинки

Для регулировки крыльев спинки (рис. 1.1 позиция 1) требуется выполнить следующие действия:

1. Ослабить фиксирующие винты на задней стороне спинки (рис. 1.3 позиция 3) левого и правого толкателя крыла (рис. 1.2 позиция 2). Не нужно выкручивать фиксирующие винты полностью. Достаточно ослабить для обеспечения возможности перемещения толкателя крыла по пазам;



Рис. 1.1 Регулировка крыльев спинки



Рис. 1.2 Расположение толкателей крыла



Рис. 1.3 Фиксирующие винты

2. Установить крылья спинки (1) в требуемое для пользователя положение;
3. Подвести ролик толкателя крыла (2) до касания с крылом спинки (1);
4. Затянуть фиксирующие винты (3).

2.1. Использование функции «Лифт»

Для использования функции «Лифт» требуется выполнить следующие действия:

1. Открыть меню, нажав кнопку «Выбор справа» (см. рис. 2.1).
2. В появившемся меню кнопками «Вверх» и «Вниз» выбрать «Функции кресла люкс», подтвердить выбор кнопкой «Выбор справа».
3. В появившемся меню кнопками «Вверх» и «Вниз» выбрать «Лифт», подтвердить выбор кнопкой «Выбор справа».
4. В открывшемся окне кнопками «Вверх» и «Вниз», либо перемещением джойстика движениями «К себе» и «От себя» поднять/опустить кресло на требуемую высоту.

При открытом окне функции «Лифт» движение коляски невозможно. Для начала движения требуется вернуться на начальный кран, нажимая на кнопку «Выбор слева».

2.2. Использование функции «Кровать»

Для использования функции «Кровать» требуется выполнить следующие действия:

1. Открыть меню, нажав кнопку «Выбор справа» (рис. 7.2 позиция 3 инструкции по эксплуатации).

2. В появившемся меню кнопками «Вверх» и «Вниз» выбрать «Функции кресла люкс», подтвердить выбор кнопкой «Выбор справа».

3. В появившемся меню кнопками «Вверх» и «Вниз» выбрать «Кровать», подтвердить выбор кнопкой «Выбор справа».

4. В открывшемся окне кнопками «Вверх» и «Вниз», либо перемещением джойстика движениями «К себе» и «От себя» подобрать требуемое положение.



Рис. 2.1. Пульт управления с LCD дисплеем