



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик регулируемой опоры под спину Barry Base.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Регулируемая опора под спину Barry Base предназначена для повышения уровня комфорта лежащему больному, а также взрослому (пожилому) человеку во время отдыха и сна.

1.2 Технические характеристики

цвет	синий
материал	каркас выполнен из стали, обивка полиэстер
высота обивки (см)	47
ширина обивки (см)	57
габариты подголовника (см)	33x18
вес изделия (кг)	2,5

1.3 Упаковка

Комплектация: опора под спину, руководство по эксплуатации

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, проверьте все части на наличие трещин!

Пожалуйста, убедитесь, что опорная балка надежна зафиксирована в пазах.

В противном случае, спинка может сложиться и быть причиной серьезных повреждений.

Максимальная нагрузка: 113 кг

2.2 Порядок работы

Данное изделие поставляется в собранном виде и не требует сборки.
Для регулировки угла наклона установите опорную балку в один из пазов на раме.

3. Техническое обслуживание

Уход за изделием следует проводить водой и не абразивными чистящими средствами.

Во избежание возникновения коррозии, тщательно высушите обработанную поверхность.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати,
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Регулируемая опора под спину Barry Base
Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Тел./факс : (495) 792-31-90
(800) 200-31-90;
www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru